

Behandler*in: MagEStic Aligner
Patient*in: Magic, Maya
Paket: Classic


Aligner Oberkiefer: 12
Aligner Unterkiefer: 0
Art des Retainers: herausnehmbar

ASR: ✓
Attachments: ✓
Extraktionen: ✗

ASR - proximale Schmelzreduktion


Bitte entfernen Sie proximal Zahnschmelz im angegebenen Umfang in den angegebenen Bereichen.
Führen Sie die Schmelzreduktion vor dem Wechsel zum jeweiligen Aligner durch.

Nutzen Sie diesen Plan zur Dokumentation der erfolgten Behandlung.

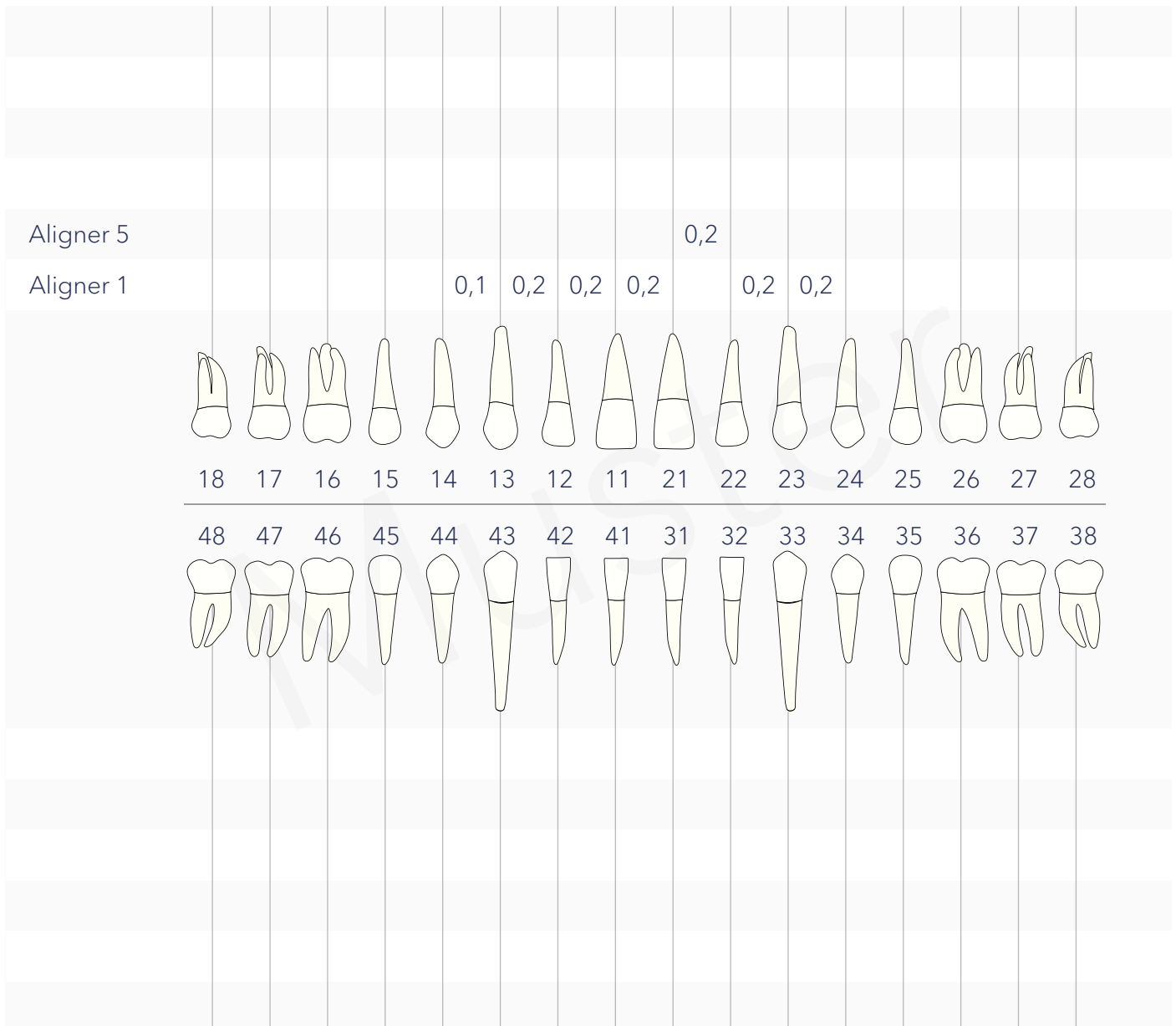

Attachments

Bitte verwenden Sie die mitgelieferte(n) Matrix-Schiene(n) zum Anbringen der Attachments.
Bringen Sie die Attachments vor dem Einsetzen der ersten Schiene an.

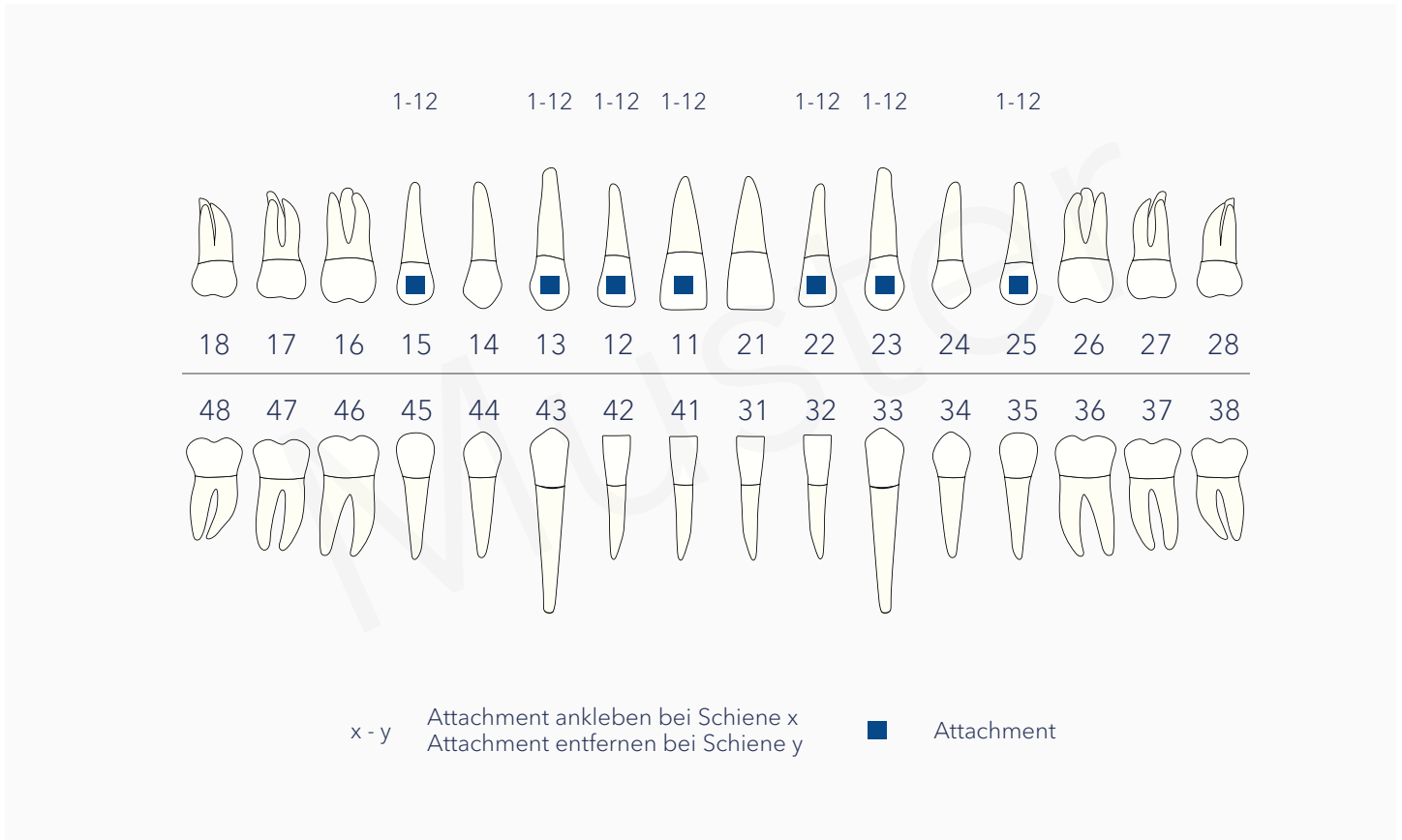

Extraktionen:

Folgende Zähne waren rechtzeitig vor Behandlungsbeginn zu extrahieren: _____ keine _____

Zu beachten:

keine besonderen Hinweise _____

Allgemeine Informationen:

- Jeder Aligner bzw. jedes Aligner-Paar sollte jeweils zwei Wochen getragen werden.
- Im Fall von Verlust oder Zerstörung eines Aligners, kontaktieren Sie uns bitte umgehend, um wenn nötig einen Ersatz zu erhalten. Ihr Patient trägt bis zum Eintreffen der Ersatzschiene die vorherige Schiene. Je nach Behandlungsfortschritt kann er alternativ auch bereits zur nachfolgenden Schiene wechseln.

Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen rund um das Thema Aligner-Therapie. Kontaktieren Sie uns jederzeit.