

Zähne säubern

- Plaque und Zahnstein entfernen.



Vorbereitung

- Wangenspreizer einsetzen.
- Matrix-Schiene einsetzen und richtigen Sitz überprüfen.
- Farblich zum Zahn passendes Komposit auswählen.
- In die Attachment-Vertiefungen der Matrix-Schiene ein wenig Vaseline oder Glycerin zur Isolierung einbringen.

Zähne anätzen

- Ätzel auf die Zähne auftragen, auf denen die Attachments sitzen sollen.
(Verarbeitung nach Herstellerangabe)

Haftvermittler auftragen

- Auf den angeätzten Zähnen den Haftvermittler aufbringen.
(Verarbeitung nach Herstellerangabe)

Attachments anbringen

- Ausgewähltes Komposit in die Attachment-Vertiefungen einfüllen.
- Matrix-Schiene einsetzen und insbesondere um die Attachments herum fest andrücken.
- Komposit-Material aushärten.
(Verarbeitung nach Herstellerangabe)

Matrix-Schiene vorsichtig entfernen

- Matrix-Schiene von distal nach mesial „herausklicken“.
- An der Innenseite der Molaren beginnen.

Zähne reinigen

- Nach Entfernen der Matrix-Schiene überschüssiges Material mit einem Scaler entfernen.
(Dies ist wichtig, da der Aligner sonst ggf. nicht richtig einrastet.)

Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen rund um das Thema Aligner-Therapie. Kontaktieren Sie uns jederzeit.