

## Checkliste

# BEHANDLUNGSBEGINN

Vor Behandlungsbeginn lassen Sie sich bitte eine Patienteneinverständniserklärung unterschreiben. Eine Vorlage dafür steht Ihnen zum Download in unserem Portal bereit.

Aussagekräftige Auftragsunterlagen sind die Basis für die Erstellung eines zielführenden Behandlungsplans und den Erfolg der Therapie. Nachfolgende Hinweise unterstützen Sie bei der effektiven Zusammenstellung und Eingabe der Daten im MagEStic Aligner Portal ([www.portal.mages-dental.de](http://www.portal.mages-dental.de)).

## Abformung/Scan



### Abdruck mit Silikon

- Nutzen Sie nur hochwertige Silikone; keine Alginate.
- Vermeiden Sie Verzüge und/oder Fahnen.
- Achten Sie darauf, dass genügend Material im Löffel ist.
- Nehmen Sie Quetschbisse bei nicht-vollbezahnten Kiefern.

 Abdruck OK

 Abdruck UK

 Quetschbiss

oder

 Intraoralscan OK

 Intraoralscan UK


### Intraoralscan

- Bilden Sie die Zahnoberflächen vollständig ab.
- Achten Sie darauf, dass Scans keine Fehlstellen aufweisen.
- Dateiformat: STL



Wir benötigen immer die Abformungen beider Kiefer, auch wenn nur ein Kiefer behandelt wird. Nehmen Sie vorab eine Zahnreinigung vor. Verwenden Sie keine gewachste Zahnseide vor Abdrucknahme/Intraoralscan.

## Röntgenaufnahme (OPG/DVT)



- Senden Sie aktuelle Aufnahmen (nicht älter als 3 Monate).
- Bilden Sie vorhandene prothetische Versorgungen ab.
- Dateiformat: JPEG/JPG, PNG, BMP

 OPG/DVT

## Fotoaufnahmen extraoral



- Wählen Sie einen neutralen Hintergrund.
- Positionieren Sie das Gesicht des Patienten mittig.
- Stellen Sie eine gute Belichtung sicher, ggf. mit Blitz.
- Dateiformat: JPEG/JPG, PNG, BMP

 Frontal lächelnd

 Profil links

 Profil rechts

## Fotoaufnahmen intraoral



- Verwenden Sie einen Wangenspreizer.
- Fotografieren Sie Ober- und Unterkiefer.
- Bilden Sie die Okklusionsebene parallel zum Boden ab.
- Positionieren Sie die Mittellinie bei Frontalaufnahmen zentral.
- Dateiformat: JPEG/JPG, PNG, BMP

 Intraoral links

 Intraoral frontal

 Intraoral rechts

## Checkliste

# BEHANDLUNGSBEGINN

## Behandlungsziel

- Besprechen Sie mit Ihrem Patienten sein Hauptanliegen und fragen Sie nach, was ihn am meisten stört.
- Häufige Behandlungsziele sind: Front idealisieren, Engstände auflösen, Mittellinie verschieben, Diastema schließen.
- Mögliche Zahnbewegungen sind: Rotation, Intrusion, Extrusion, Angulation, Mesialisierung, Distalisierung, Inklination, vestibuläre/linguale Bewegung.
- Beschreiben Sie das Behandlungsziel aussagekräftig und deutlich.
- Beantworten Sie diese Frage: Was soll durch die Therapie erreicht werden?

### Beispiel

- Unterkieferzahnbogen harmonisieren
- Engstand aufheben



Um den Kostenrahmen Ihres Patienten nicht zu überschreiten, ist es möglich, die Behandlung auf ein bestimmtes Leistungspaket zu begrenzen. Davon raten wir jedoch ab, da dies dazu führen kann, dass das angestrebte Behandlungsziel nicht vollständig realisierbar ist.

## Behandlungsbereich

- Geben Sie den gewünschten Behandlungsbereich an.



Zahnärzt\*innen mit wenig kieferorthopädischer Erfahrung empfehlen wir, sich zunächst auf den Behandlungsbereich von 5 bis 5 zu begrenzen.

## Befundsituation

- Geben Sie sämtliche klinische Besonderheiten an. Dazu zählen z.B. fehlende, zerstörte, kariöse oder zu extrahierende Zähne. Geben Sie auch Regio und Art von ggf. vorhandenem Zahnersatz unbedingt an.

## Behandlungspräferenzen

- Geben Sie an, ob Sie im Rahmen der Therapie, falls nötig, folgende Maßnahmen durchführen möchten:
  - ASR (approximale Schmelzreduktion) durchführen
  - Attachments anbringen
  - Extraktionen vornehmen



Falls eine oder mehrere Maßnahmen nicht gewünscht sind, kann sich dies auf das erreichbare Behandlungsziel auswirken. Kurzanleitungen zum Anbringen von Attachments und Durchführen von ASR stehen Ihnen kostenfrei im Schulungsbereich des MagEStic Aligner Portals zur Verfügung.

Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen rund um das Thema Aligner-Therapie. Kontaktieren Sie uns jederzeit.

MagEStic Aligner | Betriebsstätte: Ottostraße 14, 63741 Aschaffenburg | +49 6021 - 494 07 06 | office@magestic-aligner.de | www.magestic-aligner.de