

## Kurzanleitung

# ATTACHMENTS

### Zähne säubern

- Plaque und Zahnstein entfernen.

### Vorbereitung

- Wangenspreizer einsetzen.
- Matrix-Schiene einsetzen und richtigen Sitz überprüfen.
- Farblich zum Zahn passendes Komposit auswählen.
- In Attachment-Vertiefungen der Matrix-Schiene etwas Vaseline oder Glycerin zur Isolierung einbringen.

### Zähne anätzen

- Ätzelgel auf die Zähne auftragen, auf denen die Attachments angebracht werden sollen.  
(*Verarbeitung nach Herstellerangabe*)

### Haftvermittler auftragen

- Auf den angeätzten Zähnen den Haftvermittler aufbringen.  
(*Verarbeitung nach Herstellerangabe*)

### Attachments anbringen

- Ausgewähltes Komposit in die Attachment-Vertiefungen einfüllen.
- Dem Patienten Matrix-Schiene einsetzen und insbesondere um die Attachments herum fest andrücken.
- Komposit-Material aushärten.  
(*Verarbeitung nach Herstellerangabe*)

### Matrix-Schiene vorsichtig entfernen

- Matrix-Schiene von distal nach mesial „herausklicken“.
- An der Innenseite der Molaren beginnen.

### Zähne reinigen

- Nach Entfernen der Matrix-Schiene überschüssiges Material mit Scaler entfernen.  
(Dies ist wichtig, da der Aligner sonst ggf. nicht richtig einrastet.)



## Kurzanleitung

# APPROXIMALE SCHMELZREDUKTION

### ASR-Zubehör

Für die Durchführung einer ASR empfehlen wir oszillierende Winkelstücke mit den zugehörigen Strips. Der Hub solcher Winkelstücke sorgt für einen fünfmal schnelleren Abtrag im Vergleich zur manuellen Reduktion. Die Instrumente arbeiten minimalinvasiv und sorgen mit ihrer Effektivität für eine große Zeit- und Kostenersparnis. Beim Polieren der Zahnzwischenräume lassen sich äußerst glatte Oberflächenstrukturen herstellen. Durch die integrierte Wasserkühlung wird die Behandlungsstelle kontinuierlich besprüht, was die ASR für Ihre Patienten deutlich angenehmer macht. Gerne beraten wir Sie zu den geeigneten Werkzeugen.

### Weichgewebe schützen

- Bevor Sie mit der ASR beginnen, setzen Sie einen Wangenspreizer und/oder Watterollen ein, um das Weichgewebe zu schützen.

### Zahnschmelz abtragen und ASR-Abtrag messen

- Führen Sie die ASR entsprechend dem Behandlungsplan an allen notwendigen Stellen durch.
- Beginnen Sie beim Abtragen des Zahnschmelzes mit einem Opener. Mit Hilfe der Sägezähne des Openers kann der Kontaktpunkt aufgelöst und ein erster Interdentalspalt erzeugt werden.
- Verwenden Sie im nächsten Schritt den dünnsten Strip/Handstreifen zuerst, auch wenn der vorgegebene ASR-Abtrag größer ist. Bewegen Sie den Strip so lange vorsichtig vor und zurück, bis Sie merken, dass sich der Kontakt auflöst und der Streifen passiv wird.
- Kontrollieren Sie mit Hilfe der Messlehre den Abstand zwischen den Zähnen.
- Wiederholen Sie den Vorgang mit dem jeweils nächst dickeren Strip, bis die vorgesehene Schmelzmenge abgetragen ist (siehe Behandlungsplan).
- Überprüfen Sie immer den aktuellen Abstand, bevor Sie zum nächsten Strip übergehen.
- Besondere Vorsicht ist im zervikalen Kontaktbereich geboten.
- Achten Sie darauf, dass sich durch ungleichmäßiges Abtragen kein Rand im unteren Zahnbereich bildet.

### Polieren

- Polieren Sie die Stellen, an denen Sie die ASR durchgeführt haben, mit dem Polisher/Polierstreifen, bis die Flächen glatt und abgerundet sind.
- Bewegen Sie den jeweiligen Polisher/Polierstreifen dafür vorsichtig vor und zurück.

### Überprüfen und Dokumentieren

- Überprüfen Sie abschließend noch einmal mit Hilfe der Messlehre die entstandenen Abstände.
- Prüfen Sie anhand des Behandlungsplans, dass die ASR an allen notwendigen Stellen durchgeführt wurde.
- Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse mit Behandlungsdatum im Behandlungsplan.



In unserem Online-Shop erhalten Sie sämtliche Werkzeuge und Zubehör, die Sie für die ASR benötigen. Beim Anlegen eines Auftrages können Sie auch direkt fallspezifische Opener, Strips und Polisher mitbestellen und erhalten automatisch 15 % Rabatt.

Setzen Sie bei der jeweiligen Behandlung die Methoden, Techniken und Materialien ein, die sich für den betreffenden Patienten am besten eignen. Die Gebrauchsanweisungen der Hersteller sind zu beachten. Die volle Verantwortung für sämtliche Methoden und Techniken, die während einer Behandlung zur Anwendung kommen, liegt alleinig bei dem/r Behandler\*in.

Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen rund um das Thema Aligner-Therapie. Kontaktieren Sie uns jederzeit.

MagEStic Aligner | Betriebsstätte: Ottostraße 14, 63741 Aschaffenburg | +49 6021 - 494 07 06 | office@magestic-aligner.de | www.magestic-aligner.de